

Oficina Integrada das Redes Nacionais  
de Laboratórios de Contagem de Linfócitos  
T CD4+ e Quantificação de Carga Viral do HIV

## SERVIÇOS - MOH - ABBOTT

07 /Julho/2016

## Quando NÃO apertamos as seringas

- **Goteja água das diticones**
- **Imprecisão de pipetagem**
- **Erro 3130, 3131**

## Quando NÃO limpamos e apertarmos as Diticones

- **Entrada de ar, formação de bolhas**
- **Imprecisão de pipetagem**
- **Erro 3209, 3133, 3124, 3126**

## Limpeza da mesa de trabalho

- **Contaminação por amostras e reagentes**
- **Erro de leitura de código de barras**
- **Erros: 4438, 1202, 1203, 1204**

## Limpeza do galão de água

- **Sujeira na tubulação**
- **Obstrução do Diticone**
- **Formação de bolhas**
- **Erros: 3131 e 3130**

# Limpeza do lixo sólido


- **Colisão LIHA**
- **Erro fatal – perda da corrida**
- **Erro: 3110**

# Limpeza do lixo líquido - esgoto

- **Não inicia o “Pedido”**
- **Problemas no sensor**

## Subsistema de 1 mL

- Região magnética, de aquecimento e de temperatura ambiente.
- ERROS: 3109/3130

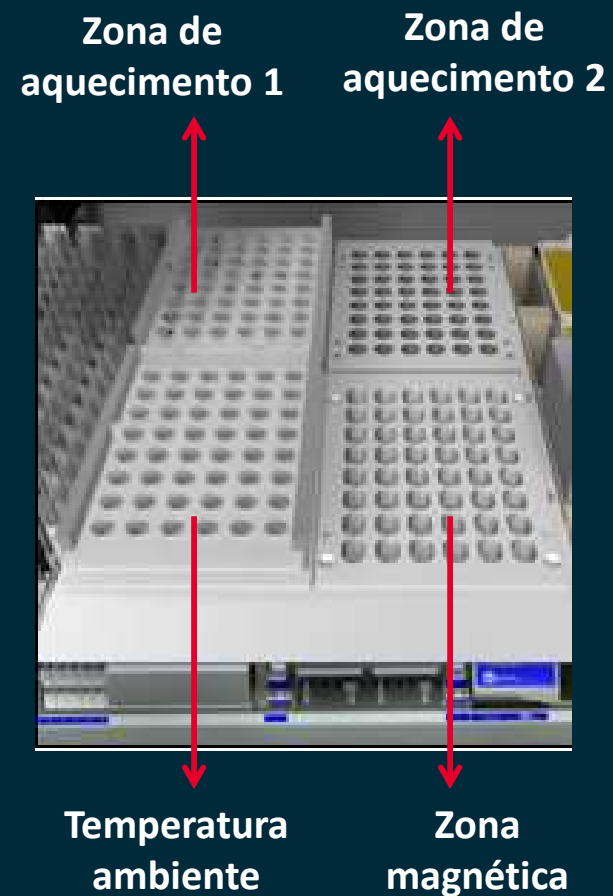

# Subsistema de 1 mL


- Como limpar o Subsistema de 1ml ?

- Pinça com gase
- Utilizar Etanol 70%
- Gase seca

- [..\videos\Limpeza do Subsistema.MOV](#)

Zona de aquecimento 1


Zona de aquecimento 2

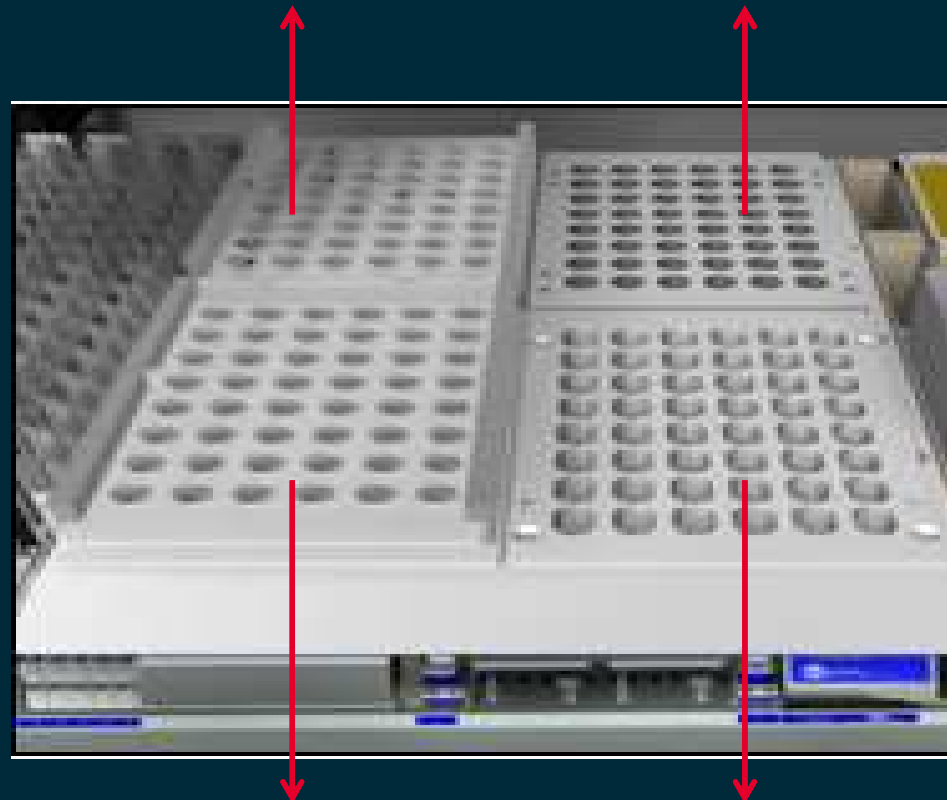

Temperatura ambiente

Zona magnética

# POS-ID

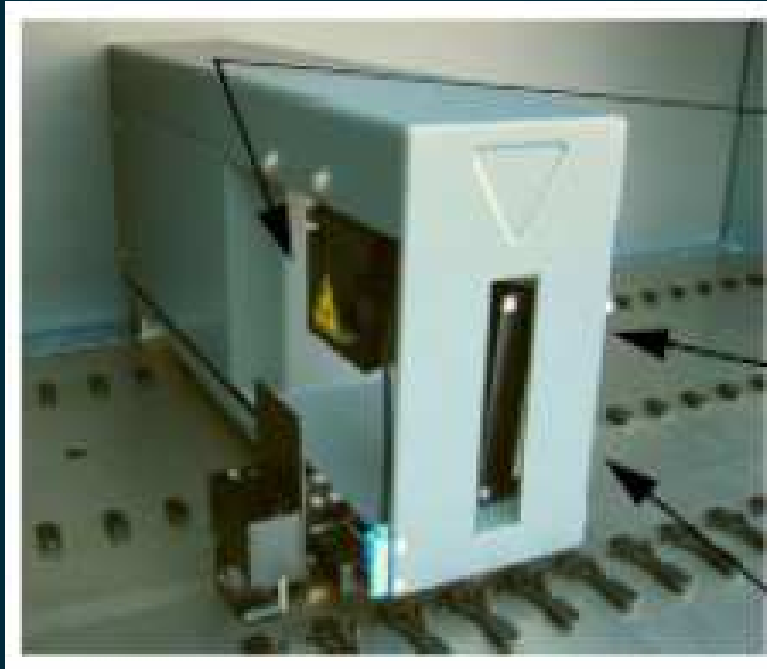

Troca do “frog” – quando necessário

[..\videos\Troca do Frog.MOV](#)

Obstrução do Eixo X

[..\videos\Colisão Posid.MOV](#)

# LiHa e RoMa



Racks de ponteiras mal posicionadas  
DITI “solta” – 3127/3110



# LiHa e RoMa

- Verificar o correto encaixe na mesa de trabalho



Rack de ponteiros mal posicionada - <..\videos\Colisão LIHA.MOV>

**ERRO FATAL - COLISÃO**

# Abbottlink

|| BRA-1006625-Sao Paulo-[REDACTED] | m2000rt 2750-[REDACTED] | 4408 Não é possível processar resultados, não há dados de leitura disponíveis.



POMServer@abbott.com  
qui 16:35

  Responder a todos | v

Este item expirará em 30 dias.

Location: BRA-1006625-Sao Paulo-[REDACTED]

Device: m2000rt 2750-[REDACTED] n Module 2750-[REDACTED]

Msg: 4408 Não é possível processar resultados, não há dados de leitura disponíveis.

Time: 23-Jun-2016 16:20:53

**Placeholder Ticket:** click [here](#) to enter POM for placeholder ticket creation

**AbbottLink DRM:** click [here](#) to access AbbottLink DRM for investigation

**Troubleshooting/KM:** click [here](#) to enter KM for troubleshooting information



**Abbott**