

# Novo autoteste de HIV do SUS

HIV Detect  
ECO Diagnóstica

**Equipe de diagnóstico**

**DCCI**

Secretaria de Vigilância  
em Saúde - SVS

Ministério  
da Saúde

DISQUE  
SAÚDE  
136

SUS+

MINISTÉRIO DA  
SAÚDE



# Autoteste Fluido Oral HIV Detect



- Tipo de amostra: Fluido Oral
- Tempo de leitura do resultado: 20 – 30 min
- Sensibilidade e especificidade: >99,9%
- Janela imunológica: 30 dias
- R\$19,00

# Autoteste Fluido Oral HIV Detect - Embalagem



# Autoteste Fluido Oral HIV Detect – Bula Ilustrativa

**HIV DETECT**  
AUTOTESTE HIV DETECT ORAL  
www.hivdetect.com.br  
PRODUTO DESENVOLVIDO PARA PÚBLICO LEIGO

## Guia do Usuário

### ANTES DE REALIZAR O AUTOTESTE PARA HIV É IMPORTANTE SABER:

O tratamento do HIV é ofertado pelo SUS. É gratuito, eficaz e possibilita que você tenha qualidade de vida e não desenvolva a AIDS. É importante você iniciar o tratamento o mais rápido possível.

Sempre conferir a data de validade do kit antes de realizar o procedimento. Não use o teste após a data de vencimento indicada na embalagem.

Aproveite para realizar a limpeza bucal com água (realizando bochechos) antes da coleta. Lembre de retirar qualquer produto dental, como dentaduras ou qualquer outra coisa que cubra as gengivas.

Não comer, beber, fumar, nem usar produtos para higiene oral (como enxaguante bucal, pasta de dente ou tira branqueadora) 30 minutos antes de realizar teste. Caso tenha utilizado alguma das substâncias acima, aguarde 30min.

### Leia o guia do usuário completamente antes de iniciar o teste.

As informações devem ser seguidas rigorosamente para obtenção de um resultado correto.

O tempo entre a infecção e a detecção do marcador pelo teste é chamado de janela de soroconversão ou janela imunológica.

Se tiver sido exposto a qualquer fator de risco nos últimos 30 dias, você pode estar no período da janela imunológica.

Você deve realizar um teste de HIV depois de 30 dias de exposição a qualquer fator de risco.

(Disponível em: <http://www.aids.gov.br/pt-br/publico-geral/o-que-e-hiv/o-que-e-sistema-imunologico>).

### Componentes do kit:

1) Swab para coleta da amostra.




4) Saco para descarte



6) Cartão de Resultado



2) Tubo com solução diluente.

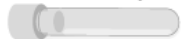

5) Instrução de uso



7) Guia do usuário



3) Tira teste.



Informação sobre tratamento  
e qualidade de vida

Janela Imunológica

Componentes do kit



# Autoteste Fluido Oral HIV Detect – Bula Ilustrativa

## Advertências e precauções:

É importante realizar o teste em um lugar bem iluminado. Você deve ter um relógio ou um cronômetro com a capacidade de contar de 20 a 30 minutos. Não use o teste se ele estiver sido aberto ou se falta algum componente do kit. Não coloque o Swab para coleta da amostra no tubo teste com solução diluente antes de passá-lo na gengiva.

## Procedimento:

1) Pegue o tubo com solução diluente e inverta o tubo 3 vezes para misturar bem.



2) Retire suavemente a tampa do tubo, tomando cuidado para não derramar o líquido.



3) Coloque o tubo com a solução diluente no local indicado no cartão de resultado.



Caso o líquido seja derramado, o TESTE NÃO PODERÁ SER UTILIZADO. Outro kit deverá ser obtido para realização do teste.


4) Abra a embalagem que contém o Swab para coleta de amostra. **OBS: Não toque a área de coleta com os dedos.**




5) Passe suavemente o Swab sobre a gengiva superior 10 vezes e gengiva inferior 10 vezes, indo de um canto a outro.



6) Coloque o Swab para coleta de amostra no tubo com solução diluente e faça movimentos leves para cima e para baixo, encostando o Swab na parede do tubo por 10 vezes, por aproximadamente 45 segundos, para que a amostra seja misturada na solução diluente. Ao retirar o Swab, pressioná-lo na parede do tubo para deixar todo o líquido contido nele na solução diluente.

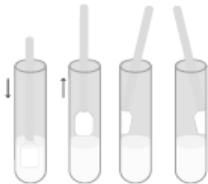


7) Remova o Swab para coleta de amostra.

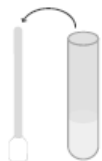

## Leitura dos resultados:

### Resultado NEGATIVO/NÃO REAGENTE

Se somente uma linha aparecer na região do controle (C), a ausência de coloração na região do teste (T) indica que o resultado é NEGATIVO.

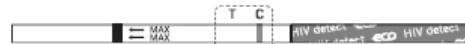

Recomenda-se fazer o teste regularmente, usar sempre a camisinha e/ou outras opções de prevenção combinada e procurar um serviço de saúde para avaliar riscos de transmissão do HIV. Se o seu resultado for negativo, continue se prevenindo. Existem diferentes alternativas de prevenção combinada: camisinha, gel lubrificante, profilaxia pré-exposição (PrEP), a profilaxia pós-exposição (PEP), entre outras. Certamente alguma ou algumas delas se adequam melhor às suas práticas sexuais.

Advertências e precauções:  
Cuidados!

Procedimento

Interpretação do Resultado


# Autoteste Fluido Oral HIV Detect – Bula Ilustrativa

Se o líquido ficar muito turvo pode indicar má higienização da boca e gengiva. O teste pode não funcionar corretamente. Descarte o teste e repita com um novo kit.

8) Retire a tira teste da embalagem de alumínio.



Tome cuidado para não tocar a área abaixo das setas (MAX).

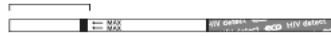


9) Insira a tira teste no tubo contendo a amostra misturada com a solução diluente com a seta apontada para baixo, como na figura, na direção da amostra. Não permita que o nível de amostra ultrapasse a linha MAX.




10) Comece a contar o tempo.

Deixe a tira teste por somente 20 minutos dentro do tubo contendo a amostra misturada com a solução diluente, conte o tempo utilizando relógio ou cronômetro, por exemplo o do celular.

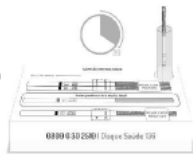

**Não ultrapassar 20 minutos com a tira teste dentro do tubo para não ocorrer resultados errôneos.**

11) Retire a tira teste após 20 minutos e coloque no local demarcado no cartão de resultado e realize a leitura. Não leia o resultado antes de transcorridos 20 minutos do teste, pode indicar um resultado incorreto.

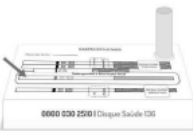


O resultado deve ser lido entre 20 e 30 minutos, a leitura após 30 minutos pode indicar um resultado incorreto.



## Resultado POSITIVO/REAGENTE

Se duas linhas aparecerem, uma na região do controle (C) e uma na região do teste (T), ainda que fraca ou muito fraca, é possível que tenha o vírus HIV.

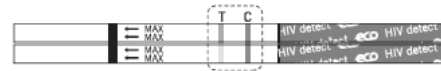

O resultado reagente (positivo) isolado deste autoteste não confirma o diagnóstico da infecção pelo HIV. Procure um serviço de saúde para a realização de testes complementares. Se possível, leve consigo o cartão de orientação disponibilizado na embalagem do autoteste.

## Resultado INVÁLIDO

Se a linha controle (C) não aparecer, o teste é inválido mesmo com o aparecimento da linha T. A linha controle deverá sempre aparecer se o procedimento for realizado adequadamente. O autoteste deve ser descartado. Sugere-se a realização de um novo autoteste e a notificação do ocorrido ao SAC da empresa descrito na embalagem do produto.



## Descarte do teste:

Tampe o tubo contendo a amostra misturada com a solução diluente. Descarte todo o conteúdo do kit no saco de descarte que acompanha o kit. Lacre o saco de descarte e jogue em um lixo comum. Este saco de descarte ajudará a proteger sua privacidade.



"A sua opinião é muito importante para o SUS. Responda algumas questões sobre a sua experiência com o autoteste de HIV de forma anônima nesse QR code."



Descarte dos insumos

Questionário pós-teste

Atendimento de segunda a sexta-feira, de 8h às 17:48h.  
e-mail: [hivdetect@ecodiagnostica.com.br](mailto:hivdetect@ecodiagnostica.com.br)  
skype: hivdetect  
Atendimento 24 horas: 0800 030 2510 ☎ 38 99842-0197

[www.hivdetect.com.br](http://www.hivdetect.com.br)  
[contato@ecodiagnostica.com.br](mailto:contato@ecodiagnostica.com.br)  
[www.ecodiagnostica.com.br](http://www.ecodiagnostica.com.br)



SAC

DISQUE  
SAÚDE  
136



# Autoteste Fluido Oral HIV Detect - Kit

## Componentes do kit:

1) Swab para coleta da amostra.



2) Tubo com solução diluente.



3) Tira teste.




4) Saco para descarte



5) Instrução de uso



6) Cartão de Resultado

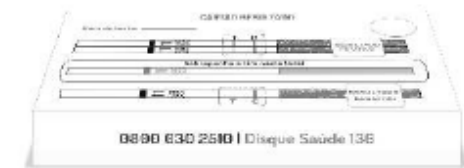

7) Guia do usuário




# Autoteste Fluido Oral HIV Detect - Procedimentos


1.



3.

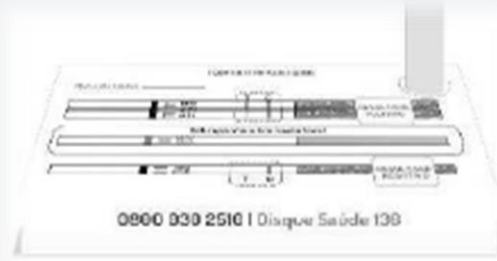

5.

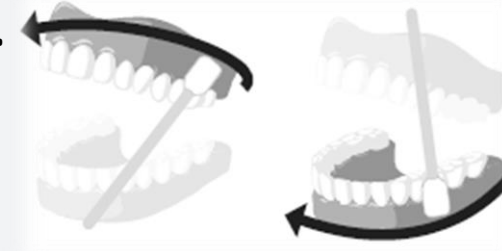


2.



4.



6.

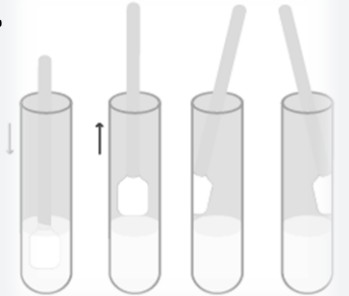

1. Inverter 3 vezes o tubo de solução diluente

2. Retirar a tampa do tubo de solução diluente

3. Colocar o tubo no local indicado no cartão de resultado

4. Abrir a embalagem onde contém o Swab (não tocar a área de coleta)

5. Passar o swab na gengiva superior 10 vezes e na inferior 10 vezes de um canto ao outro

6. Colocar o swab no tubo e fazer movimentos para cima e para baixo (10 vezes) e no momento de retirar pressionar o swab contra as paredes do tubo



# Autoteste Fluido Oral HIV Detect - Procedimentos

7. Remover o swab do tubo



8. Retirar a tira teste da embalagem de alumínio (não tocar a área abaixo das setas)

9. Insirir a tira no tubo com a seta apontada para baixo


10. Deixar a tira teste por 20 min dentro do tubo

11. Retirar a tira do tubo em 20 min e coloque no local indicado do cartão de resultado



12. Ler o resultado entre 20-30 min.

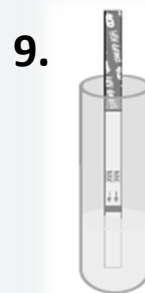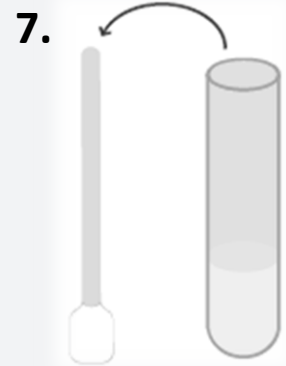

10 e 11

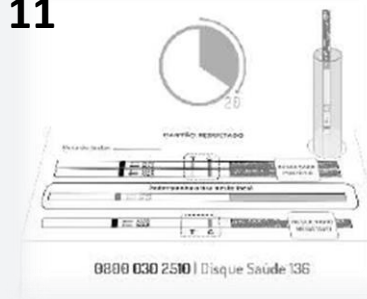

12.

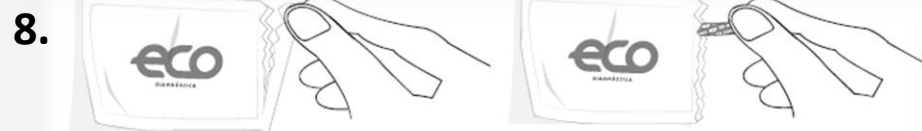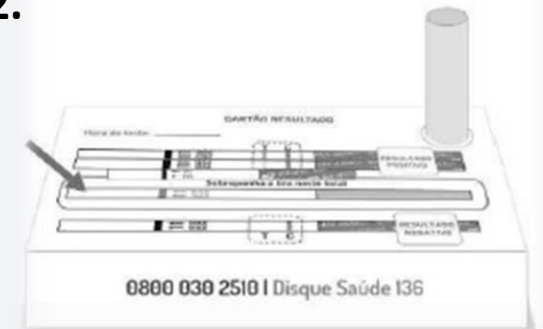

Tome cuidado para não tocar a área abaixo das setas (MAX).






DISQUE  
SAÚDE  
136



MINISTÉRIO DA  
SAÚDE



# Autoteste Fluido Oral HIV Detect – Cartão de Resultado e de Orientação

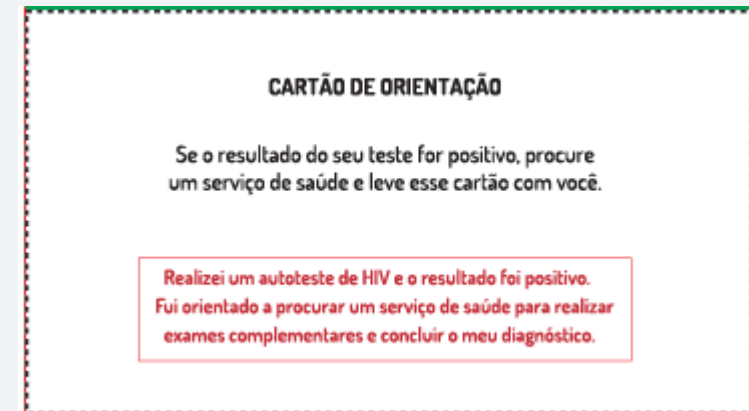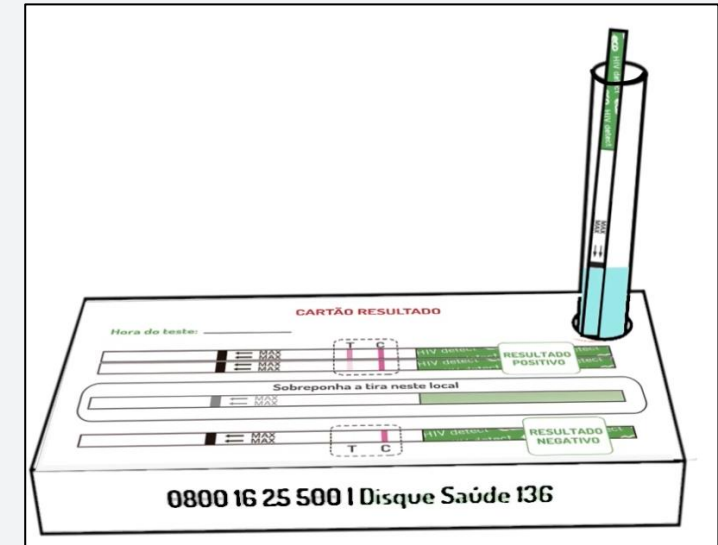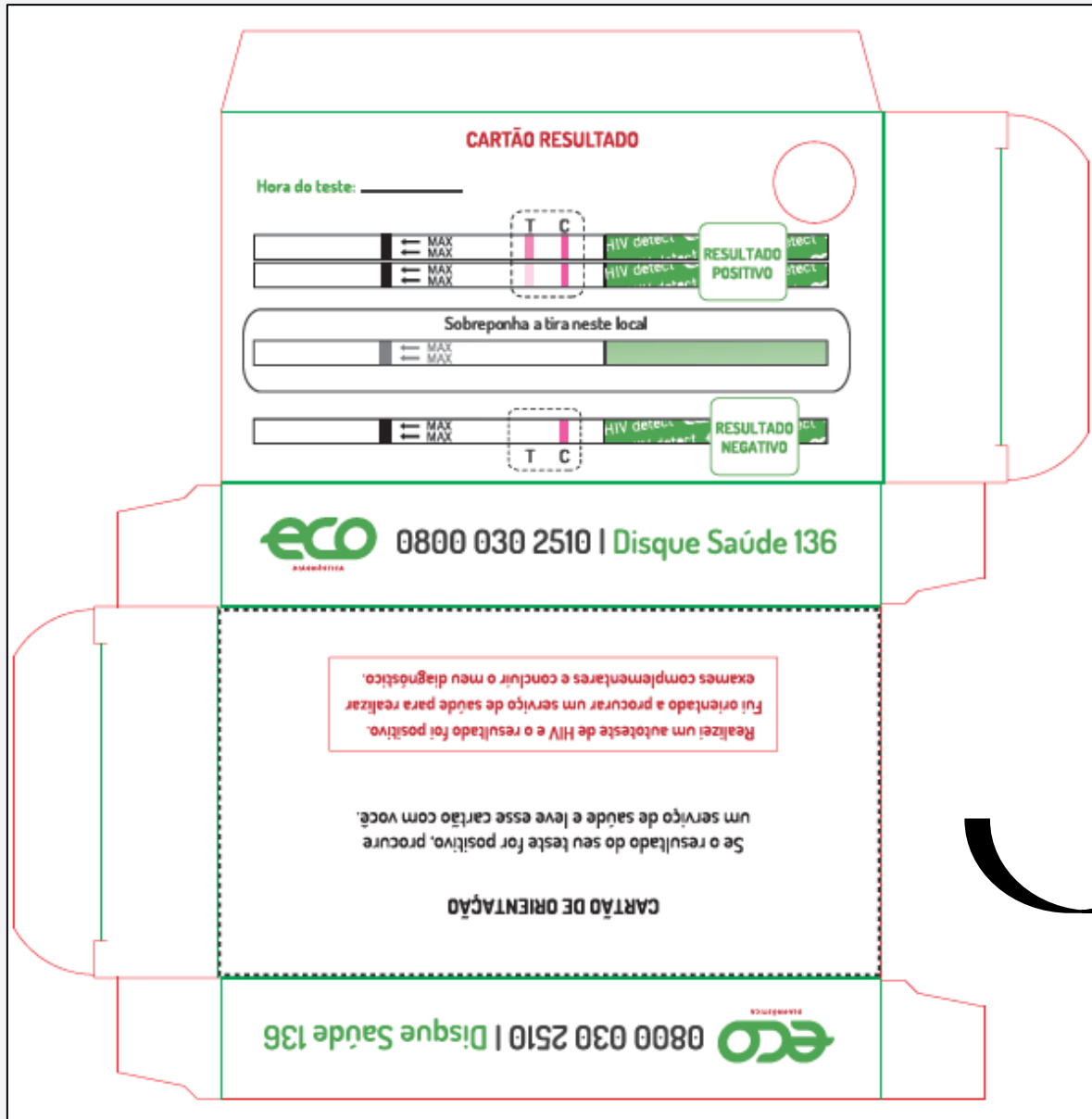


# Autoteste Fluido Oral HIV Detect – Interpretação do Resultado

## NÃO REAGENTE

Leitura dos resultados:

### Resultado NEGATIVO/NÃO REAGENTE

Se somente uma linha aparecer na região do controle (C), a ausência de coloração na região do teste (T) indica que o resultado é NEGATIVO.

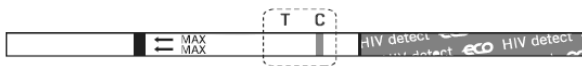


Recomenda-se fazer o teste regularmente, usar sempre a camisinha e/ou outras opções da prevenção combinada e procurar um serviço de saúde para avaliar riscos de transmissão do HIV. Se o seu resultado for negativo, continue se prevenindo. Existem diferentes alternativas de prevenção combinada: camisinha, gel lubrificante, profilaxia pré-exposição (PrEP), a profilaxia pós-exposição (PEP), entre outras. Certamente alguma ou algumas delas se adequam melhor às suas práticas sexuais.

## REAGENTE

### Resultado POSITIVO/REAGENTE

Se duas linhas aparecerem, uma na região do controle (C) e uma na região do teste (T), ainda que fraca ou muito fraca, é possível que tenha o vírus HIV.

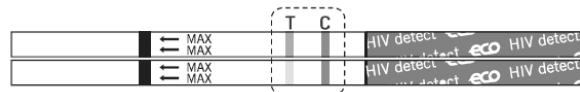


O resultado reagente (positivo) isolado deste autoteste não confirma o diagnóstico da infecção pelo HIV. Procure um serviço de saúde para a realização de testes complementares. Se possível, leve consigo o cartão de orientação disponibilizado na embalagem do autoteste.

## INVÁLIDO

### Resultado INVÁLIDO

Se a linha controle (C) não aparecer, o teste é inválido mesmo com o aparecimento da linha T. A linha controle deverá sempre aparecer se o procedimento for realizado adequadamente.

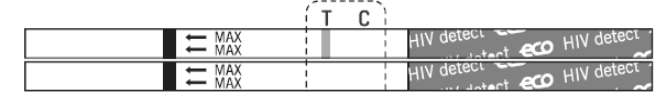

O autoteste deve ser descartado. Sugere-se a realização de um novo autoteste e a notificação do ocorrido ao SAC da empresa descrito na embalagem do produto.

# Autoteste de HIV no SUS

Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis  
MINISTÉRIO DA SAÚDE

Buscar

Notas informativas | PCDT | Serviços de saúde | Biblioteca | Editais e licitações

INÍCIO » PÚBLICO GERAL » TESTAGEM PREVENÇÃO COMBINADA » AUTOTESTE DE HIV

## Autoteste de HIV

- O QUE É UM AUTOTESTE
- O AUTOTESTE DE HIV NO SUS**
- SAIBA MAIS SOBRE O AUTOTESTE DE HIV
- REALIZANDO O AUTOTESTE
- RESULTADO
- ONDE OBTER UM AUTOTESTE DE HIV
- DÚVIDAS FREQUENTES (FAQ)
- COMUNICAÇÃO
- FEZ O AUTOTESTE DE HIV? QUEREMOS TE OUVIR!
- MATERIAIS INFORMATIVOS

<http://www.aids.gov.br/pt-br/autoteste/o-autoteste-de-hiv-no-sus>

- PÚBLICO GERAL
  - Infecções Sexualmente Transmissíveis
  - Hanseníase
  - Hepatites Virais
  - HIV
  - Tuberculose
  - Prevenção Combinada
  - Como é a prevenção da transmissão vertical de HIV, sífilis e hepatite B
  - Direitos das PVHIV
- GESTORES
- PROFISSIONAIS DE SAÚDE
- SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA
- CENTRAIS DE CONTEÚDOS
  - Campanhas
  - Galeria de fotos
  - Vídeos
  - Áudio
  - Biblioteca
  - Aplicativos
  - Notícias
  - Transmissão ao vivo
- História da Aids
- Boletins Epidemiológicos – Linha do tempo
- Campanhas – Linha do tempo
- Histórico das ações de hepatites virais
- Boletins Epidemiológicos – Linha do tempo
- ACESSO À INFORMAÇÃO

## O autoteste de HIV no SUS

As estratégias para distribuição do autoteste de HIV no SUS são ações no território que permitem o acesso à testagem para populações que historicamente enfrentam dificuldades para acessar os serviços de saúde por uma série de motivos. Desta forma, incluem a distribuição em locais de sociabilidade desta população e a distribuição para pares e parceiras sexuais de pessoas vivendo com HIV ou em situação de maior vulnerabilização ao HIV.

Estratégias para distribuição do autoteste de HIV no SUS:

- Pares e parceiras sexuais de pessoas em PrEP;
- Distribuição fora dos serviços de saúde por OSC, equipes das de saúde e parceiros em locais de sociabilidade da população chave, em horários alternativos;
- Unidades de saúde: Sala para realização do autoteste em privacidade e distribuição para pares e parceiras sexuais de pessoas testadas nos serviços.

O autoteste atualmente distribuído pelo Ministério da Saúde possui uma tarja vermelha indicando que sua venda é proibida. Caso seja observada alguma intenção de venda, orienta-se denunciar na Ouvidoria (ligação para o 156 ou registrar neste formulário).

Detalhes em relação ao procedimento de testagem estão disponíveis na bula contida na caixa do produto. É importante seguir rigorosamente todas as orientações descritas na bula do produto.

Atualmente 2 autotestes são distribuídos pelo SUS. Os vídeos com o passo a passo para a execução de cada um dos autotestes estão dispostos abaixo:



O autoteste HIV Detect utiliza amostra de fluido oral. O resultado do teste é obtido em 20 minutos.



O autoteste Action! utiliza sangue total obtido por punção digital. O resultado do teste é obtido em 10 minutos.



# Video Autoteste Fluido Oral HIV Detect

<http://www.aids.gov.br/pt-br/autoteste/o-autoteste-de-hiv-no-sus>



**clab@aids.gov.br**

Secretaria de Vigilância em Saúde - SVS | Ministério da Saúde

DISQUE  
SAÚDE  
**136**



MINISTÉRIO DA  
SAÚDE



PÁTRIA AMADA  
**BRASIL**  
REPÚBLICA FEDERAL